

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

# Caviton

ТИМЧАСОВИЙ ПЛОМБУВАЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ НА ВОДНІЙ ОСНОВІ

Для використання лише лікарями-стоматологами та тільки відповідно до рекомендованих показань.

## ПОКАЗАННЯ

Матеріал для тимчасового пломбування

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

У поодиноких випадках у деяких пацієнтів матеріал може викликати підвищену чутливість. У разі виникнення таких реакцій, припиніть використання матеріалу і зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

## ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

- а) Швидко просушіть стінки порожнини ватним тампоном. Якщо стінки порожнини занадто вологі, CAVITON не прилипне до них. Висушування повітрям не є необхідним.
- б) Візьміть потрібну кількість препарату, внесіть його в порожнину і негайно після надання форми пломби, порадьте пацієнту закрити рот, щоб CAVITON змочився слиною. Якщо порожнина на оклюзійній поверхні (клас I), дайте пацієнту прикусити – це видалить надлишок матеріалу, потім надайте форму пломбі.
- в) CAVITON твердіє ззовні всередину протягом приблизно 30 хвилин після контакту зі слиною. Щоб матеріал достатньо затвердів, попросіть пацієнта не тиснути на пломбу і не надавати тертю протягом однієї години.

### ПРИМІТКА:

1. Не можна змішувати матеріал з будь-якими мастильними речовинами, тому що він не затвердіє.
2. При видаленні пломби залишки матеріалу в порожнині очищуються за допомогою невеликого ватного тампона, змоченого у спирті.
3. Після використання пляшку потрібно негайно закрити, інакше CAVITON затвердіє під дією атмосферної вологи.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте в прохолодному темному місці (4-25°C)  
(Термін придатності: 2 роки від дати виробництва)

## УПАКОВКА

Баночка 30 г пасти.  
Кольори: білий і рожевий.

**GC** CE 0086

MANUFACTURED by GC ASAHI CORP.  
15353 Kachigawa5cho Kasugai, Aichi,  
48650945, Japan

DISTRIBUTED by GC CORPORATION  
7651Hasunuma5cho, Itabashi5ku, Tokyo  
17458585, Japan

GC EUROPE N.V.  
Research5Park, Interleuvenlaan 13, B53001  
Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, Alpis, IL 60808 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.  
19 Loyang Way, # 06527 Singapore 508724