

GC Fuji® II LC CAPSULE

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПІДСИЛЕНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕМЕНТ СВІТЛОВОГО ТВЕРДІННЯ В КАПСУЛАХ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

1. Реставрація порожнин III, V класу та обмежено порожнин I класу.
2. Реставрація молочних зубів.
3. Побудова кукси.
4. Випадки, коли використання рентгеноконтрастного матеріалу є необхідним.
5. Пацієнти похилого віку.
6. Підкладка або база під реставрацію.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. Пряме перекриття пульпи.
2. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій, припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.


ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Співвідношення порошок / рідина (г/г)	0,33 / 0,10
Час замішування (сек.)	10"
Робочий час (хв., сек.) (при температурі 23°C) (від початку замішування)	3'15"
Час світлової полімеризації (сек.)	20"
Глибина полімеризації (відтінок A2) (мм)	1,8

Умови тестування : Температура (23 +/- 1°C)
Відносна вологість (50+/- 10%)


1. ПІДГОТОВКА ПОРОЖНИНИ

- а) Відпрепаруйте зуб, застосовуючи традиційну методику. Створення умов для макромеханічної ретенції не є необхідним. Для перекриття пульпи використовуйте матеріали на основі гідроксиду кальцію.
- б) Промийте водою та просушіть, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Для видалення змазаного шару рекомендовано застосовувати GC CAVITY CONDITIONER або GC DENTIN CONDITIONER (Рис. 1).

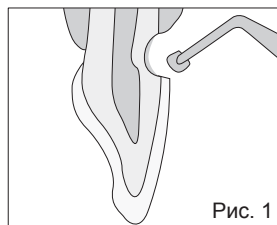

2. АКТИВАЦІЯ КАПСУЛИ ТА ЗАМІШУВАННЯ

- а) Для того, щоб розпушити порошок в капсулі перед активацією струсіть її або легенько постукайте по твердій поверхні її боковою стінкою. (Рис. 2).
- б) Для активації капсули вдавіть плунжер так, щоб він повністю занурився в капсулу (Рис. 3).

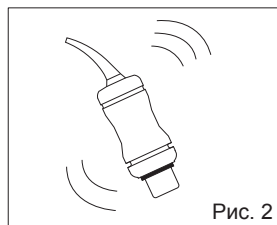


- в) Одразу вставте капсулу в пістолет GC Capsule Applier і натисніть один раз на ручку (Рис. 4). Тепер капсула активована.

Примітка:

Капсула повинна бути активована безпосередньо перед замішуванням та відразу використана.

- г) Відразу вийміть капсулу з пістолета і встановіть в міксер (або в амальгамозмішувач) та замішуйте протягом 10 секунд на високій швидкості (приблизно 4.000 циклів/хв) (Рис. 5).

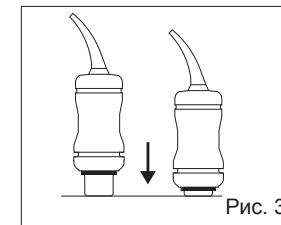

3. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ

- а) Відразу вийміть замішану капсулу з міксера і вставте її в пістолет для капсул GC Capsule Applier.
- б) Натисніть два рази, щоб заповнити носик капсули (Рис. 6). Робочий час складає 3 хвилини 15 секунд від початку замішування (при температурі 23°C (73,4°F)). Більш висока температура призведе до скорочення робочого часу.

Примітка:

1) Для того, щоб встановити носик капсули в потрібному напрямку, тримайте GC Capsule Applier у напрямку до себе та повертайте капсулу.

2) Для видалення використаної капсули натисніть звільняючу кнопку. Прокручуючи капсулу за та проти годинникової стрілки, витягніть її догори.

- в) Видаліть вологу з поверхні порожнини, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
- г) Видавть цемент в порожнину. (Рис. 7) Не допускайте утворення повітряних бульбашок.
- д) Відконтуруйте реставрацію та, якщо потрібно, встановіть матрицю.

- е) Фотополімеризуйте цемент протягом 20 секунд за допомогою звичайного полімеризатора (довжина хвилі 470 нм) (Рис. 8). Встановлюйте джерело світла якомога ближче до поверхні цементу.

Примітка:

Для порожнин глибиною більше, ніж 1,8 мм, застосовуйте техніку пошарового нанесення.

4. ФІНІШНА ОБРОБКА






Проведіть фінішну обробку за допомогою алмазного бору дрібної зернистості, силіконової головки та полірувальних штрипсів (Рис. 9).

Примітка:

Якщо поверхня цементу контактувала з повітрям під час твердіння, її потрібно вкрити GC Fuji VARNISH або GC Fuji COAT LC (Рис. 10).

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у прохолодному та темному місці при температурі (4-25°C / 39,2-77,0°F). (Термін придатності: 2 роки від дати виробництва).

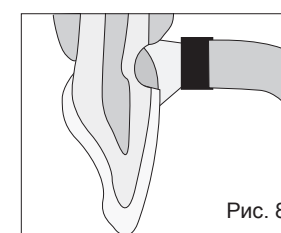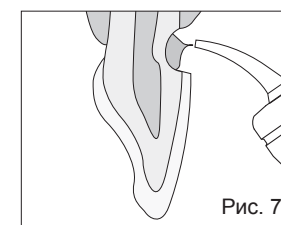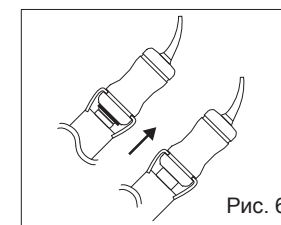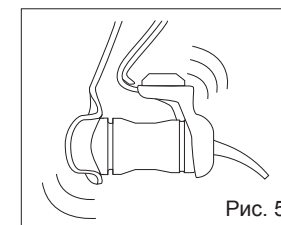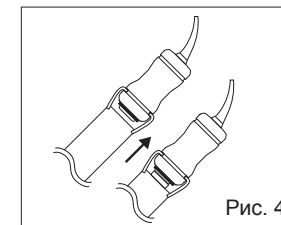

КОЛІР

A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

(11 відтінків на основі розколірки Vita®)

Vita® - це зареєстрована торгова марка компанії Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany

РОЗФАСОВКА



1. Упаковка одного відтінку: 50 капсул.

2. Упаковка асорті : 50 капсул (по 10 капсул відтінків A4, B2, B3, C2; по 5 капсул B4, D2)

* Усереднений вміст матеріалу в капсулі: 0,33 г порошку та 0,10 г (0,085 мл) рідини.

* Мінімальний загальний об'єм змішаного цементу в капсулі: 0,10 мл.

Окремо: пістолет для капсул GC CAPSULE APPLIER (1 шт.)

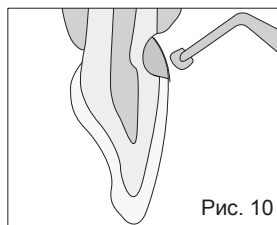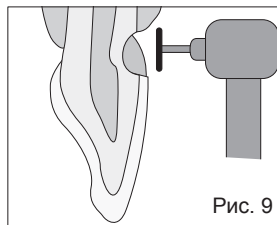

УВАГА

1. У випадку контакту з тканинами порожнини рота або зі шкірою, негайно видаліть матеріал тампоном або бавовняною серветкою, змоченими у спирті. Промийте водою.
2. При потраплянні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Останні зміни внесено: 03/2015

GC

CE 0086

MANUFACTURED by GC CORPORATION
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan
DISTRIBUTED by GC CORPORATION
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan
GC EUROPE N.V.
ResearchDPark, Interleuvenlaan 13, BD3001 Leuven, Belgium
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alpis, IL 60803 U.S.A.
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06D27 Singapore 508724

1405310GC-UA