

ПРЕСТИЖ ПАТТІ

PRESTIGE PUTTY

Prestige Putty (Престиж Патті) – тиксотропний А-силікон високої в'язкості для зняття відбитків, що характеризується високою точністю передачі деталей; ідеально підходить для зняття відбитків за двоетапною методикою; матеріал характеризується особливою м'якістю протягом робочої фази, однак після реакції вулканізації демонструє оптимальну твердість.

Матеріал має ідеальне співвідношення між робочим часом та часом твердіння, високу точність передачі деталей, високу стабільність розмірів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Prestige Putty (Престиж Патті) є ідеальним для зняття усіх видів відбитків, що використовуються для виготовлення знімних та незнімних протезів, а також ортодонтичних конструкцій, конструкцій з брекетами, тимчасових конструкцій і т.п. Призначений для використання лише в стоматології.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 4823 – ADA 19	Тип 0 Консистенція Putty (Патті)
Співвідношення база : каталізатор	1:1
Час змішування*	30 секунд
Робочий час*	2 хвилини
Час твердіння в порожнині рота*	3 хвилини 30 секунд
Час твердіння*	5 хвилин 30 секунд
Деформація при стисканні	2%
Відновлення форми	>99.5%
Стабільність розмірів протягом 24 годин	<0.2 %
Твердість за Шором (А)	67
Колір	Яскраво-рожевий

*Відлік зазначених вище часових параметрів збігається з початком змішування при температурі 23°C. Час в ротовій порожнині визначається при температурі 35°C.

ПІДГОТОВКА

- За допомогою мірних ложок з відповідним кольоровим маркуванням відміряйте матеріали з двох банок.
- Співвідношення бази до каталізатора становить 1:1.
- Змішуйте однакові порції базового матеріалу та каталізатора до набуття сумішшю однорідного забарвлення.

УВАГА

- Якщо перед змішуванням каталізатор і база обробляються окремо вручну, час твердіння може збільшитися.
- Необхідно закривати банки каталізатора та бази відразу після використання.
- Не слід міняти місцями кришки двох банок; для дозування компонентів потрібно використовувати відповідні їм мірні ложки.
- Не рекомендується користуватися латексними рукавичками.
- Відбитки, зняті масою Prestige Putty (Престиж Патті), можна покривати міддю або сріблом у ванночках для гальванізації.

ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Після зняття відбитку його потрібно стерилізувати для повного видалення дрібних частинок матеріалу та слини. Це можна робити, зануривши його в 2% розчин глютаральдегіду, 0,5% розчин гіпохлориту натрію або інший спеціально для цього призначений продукт. Відбиток може залишатися зануреним у розчин для дезінфекції протягом 30 хвилин – 1 години; при цьому ніяких деформацій не відбувається. Точно дотримуйтесь інструкцій виробника.

ВАЖЛИВО

Перед зняттям другого відбитку обов'язково промийте та акуратно висушіть перший відбиток. Це забезпечить надійну адгезію між першим та другим шарами матеріалу.

ВІДЛИВАННЯ МОДЕЛІ

Відливати модель рекомендується не раніше, ніж через 1 годину після полімеризації. Стабільність розмірів відбитку зберігається протягом 7 днів. Матеріали серії Prestige (Престиж) сумісні з усіма високоякісними стоматологічними гіпсами, наявними на ринку, наприклад, HydrocalKerr® (Гідрокал Керр) класу III та Fujirock GC® (Фуджірок ДжіСі) класу IV.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте відбитки, зняті масою Prestige Putty (Престиж Патті), при кімнатній температурі. Гарантований термін придатності продукту – 36 місяців від дати виробництва за умови правильного зберігання. Зберігайте матеріал надійно закритим у прохолодному сухому місці при температурі 4°C – 28°C. Тримайте подалі від джерел тепла, іскор та відкритого полум'я.

Термін придатності вказаний для продукту, що зберігається саме в нерозкритій оригінальній упаковці виробника.

Номер партії та термін придатності зазначені на кожній індивідуальній упаковці. У випадку виникнення будь-яких проблем цю інформацію необхідно повідомити постачальнику для точної та швидкої ідентифікації продукту.

ВАЖЛИВО: Не використовуйте продукт після закінчення терміну його придатності.

УВАГА

- Уникайте контакту очей та шкіри з каталізатором.
- У випадку контакту зі шкірою ретельно промийте відповідну ділянку водою з милом.
- У випадку контакту з очима ретельно промийте їх водою та зверніться до лікаря.
- Еластомерні матеріали – хімічно стійкі, тому не допускайте їх потрапляння на одяг, зокрема й на лабораторний спецодяг.

УПАКОВКА

Код продукту/Опис 055001 – 450 г/300 мл база + 450 г/300 мл каталізатор

Останні зміни в інструкцію внесено: 08.2020



Уповноважений представник в Україні:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«КРИСТАР-ЦЕНТР»
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2, м. Київ, 04071, Україна
тел/факс: +380445020091, e-mail: info@kristar.ua
kristar.ua

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY
Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697
E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com

ВАНІНІ ДЕНТАЛ ІНДАСТРІ Ес.Ар.Ел.

Via ді Кампігліано 55/А, 50012 Грассіна, Флоренція, Італія
Тел: +39 055 644698; Факс +39 055 644697
E-mail: info@vanninidental.com www.vanninidental.com