


Відсутність компромісів при прямій реставрації

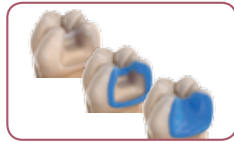

Виберіть бажану техніку. Протравіть протягом 10-15 сек, промийте та просушіть



Нанесіть G-Premio BOND та зачекайте 10 сек




Просушіть при МАКСИМАЛЬНОМУ тиску повітря



Полімеризуйте світлом протягом 10 сек

G-Premio BOND показав найвищу міцність адгезії серед продуктів, що були протестовані після термоциклювання, як на емалі, так і на дентині при самопротравлюванні.

Міцність на зсув бонду (МПа) до емалі та дентину при самопротравлюванні, після термоциклювання (20.000 циклів)

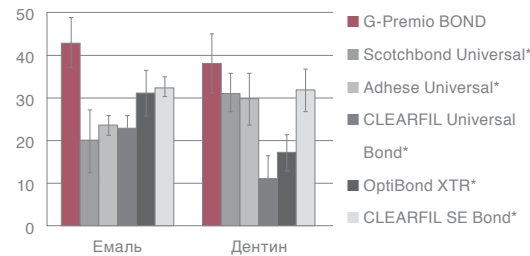

Джерело: GCC R&D data, Японія, 2015
* Не є торговою маркою GC


Відсутність компромісів при ПОЧИНЦІ



G-Premio BOND показує чудову адгезію до усіх каркасів після термоциклювання, включаючи дорогі метали, завдяки MDPF мономеру. Інші продукти, що брали участь у тестуванні, неефективні при роботі з дорогими металами.

Використання окремого праймеру (наприклад, Ceramic Primer II) разом із G-Premio BOND на кераміці забезпечує довготривалу адгезію до будь-якого типу склокераміки.

Міцність на зсув бонду (МПа) до каркасів непрямих реставрацій після термоциклів (5.000 циклів)

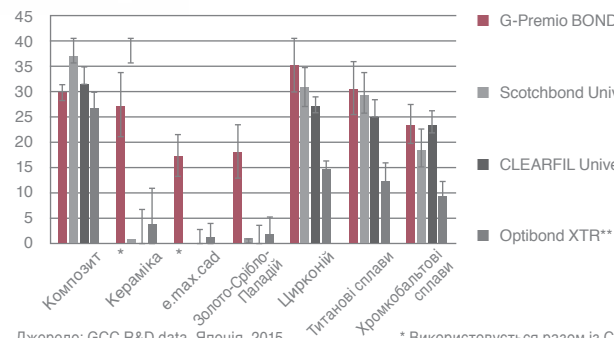

Джерело: GCC R&D data, Японія, 2015

* Використовується разом із Ceramic Primer II

Загробіть поверхню; промийте та висушіть



Якщо це керамічна поверхня - нанесіть Ceramic Primer II та висушіть



Нанесіть G-Premio BOND на усі поверхні, що потребують відновлення, та залиште на 10 сек



Просушіть при МАКСИМАЛЬНОМУ тиску повітря




Полімеризуйте світлом протягом 10 сек



** Не є торговою маркою GC

G-Premio BOND від GC


Наважтеся на...

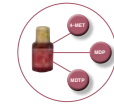

Відсутність дебондингу



Відсутність помилок

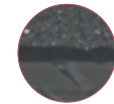

Відсутність дисколорацій



Відсутність складнощів



Відсутність постопераційної чутливості



Відсутність марнотратства



Номер артикулу	Опис
009031	G-Premio BOND 5 мл, набір
009037	G-Premio BOND 5 мл, окрема пляшка
009035	G-Premio BOND, унідоза, 50 шт.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEО Ukraine
04071 м. Київ
вул. Костянтинівська 32, оф. 11
Тел.: (044) 463.62.66
ukraine@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор компанії GC в Україні: Група компаній "КРІСТАР" 04071, м. Київ, вул. Межигірська 50, оф. 1 Тел/Факс: (044) 503-11-11 info@kristar.ua www.kristar.ua

ZO UA 8 77 03/18

G-Premio BOND від GC

Однокомпонентний універсальний адгезив світлової полімеризації

Повірте у відсутність компромісів



G-Premio BOND від GC

Однокомпонентний універсальний адгезив світлової полімеризації

Вибір потрібного бондингу за певних показань та точне виконання усіх етапів процедури є нелегким завданням. Саме тому GC створили G-Premio BOND - універсальний адгезив в одній пляшці, що сумісний з будь-яким режимом протравлювання та який можна використовувати не лише для прямого бондингу, а й для ремонту конструкцій та реставрацій, а також для лікування гіперчутливості.

До того ж GC хоче запропонувати легкість у використанні та універсальність без будь-якого впливу на якість адгезії. G-Premio BOND надає вам переваги універсальності, але разом із найкращими результатами у будь-яких ситуаціях.

Тому що ми віримо у відсутність компромісів.

Чому універсальний?

Універсальний за будь-яких режимів протравлювання
Вибір за вами!



Самопротравлювання



Вибіркове протравлювання



Тотальне протравлювання

Універсальний за будь-яких показань
Багатофункціональний!



Прямий бондинг*



Починка*



Лікування гіперчутливості**

Універсальний у використанні
Оптимальна робота з будь-якими каркасами!

4-MET

для надійної адгезії до емалі та дентину


MDP

для відмінної адгезії до емалі, дентину, цирконію, алюмінію та недорогочінних металів

MDTP

для бондингу до дорогоцінних металів***

Завдяки поєднанню трьох функціональних мономерів:

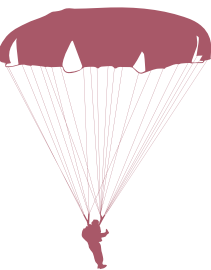

*Фотографії люб'язно надані лікарем С. Коїде, Японія
**Фотографії люб'язно надані лікарем Е. Сауджі, Японія
***MDTP: Метакрілооксидесіл дигідроген тіофосфат



Повірте у відсутність компромісів

Відсутність компромісів при роботі

Прагніть відсутності дебондингу!

Завдяки відмінній міцності адгезії як до емалі, так і до дентину, незалежно від режиму протравлювання, G-Premio BOND гарантує необхідний результат та довговічність з плином часу. Ця унікальна композиція базується на трьох функціональних мономерів (4-MET, MDP та MDTP) та забезпечує стабільну адгезію не лише до структури зуба, а й до композитів, металів (включаючи дорогоцінні), цирконію та алюмінію. У поєднанні з Ceramic Primer II, створюється довготривала адгезія до будь-якого типу кераміки, навіть після термоциклювання. Тому що ми віримо, що окремо силан забезпечить найкращий довготривалий результат.

Зробіть крок до відсутності невдач!

Націлений на відсутність дисколорацій!

Завдяки оптимальній змочуваності та здатності до проникнення, а також дуже ефективній процедурі сушіння (5 сек при МАКСИМАЛЬНОМУ тиску повітря), G-Premio BOND утворює надзвичайно тонку плівку завтовшки 3 мкм. Хоча адгезив дуже рідкий, він містить у собі велику кількість наповнювачів та фотополімеризаторів, що допомагають отримати міцний шар бондингу. Ці характеристики, разом із формулою без вмісту NEMA, гарантують довготривале зберігання адгезії та попереджують гідроліз, що призводить до дисколорацій.

Виберіть довготривалий естетичний результат!

Домагайтеся відсутності постопераційної чутливості!

Завдяки G-Premio BOND вам більше не потрібно хвилюватися через відкриті дентинні каналці, що призводять до постопераційної чутливості. При самопротравлюванні та вибіркового протравлюванні каналці відкриваються мінімально. При тотальному протравлюванні каналці будуть щільно заповнені через виняткову змочуваність бондингу та здатності до проникнення.

Жодного дискомфорту пацієнта!

Відсутність компромісів при маніпуляціях

Намагайтеся зробити 0 помилок!

Завдяки G-Premio BOND ви фактично позбудетеся маніпуляційних помилок у вашій повсякденній практиці. Завдяки поєднанню легкої процедури та невибагливої техніки G-Premio BOND пропонує цілковитий спокій під час його застосування:

- Міцність адгезії достатня навіть коли час очікування повністю не закінчений
- Неможливо пропустити етап сушіння: 5 секунд при МАКСИМАЛЬНОМУ тиску повітря
- Світлова полімеризація дуже ефективна завдяки високому вмісту фотополімеризаторів
- Полегшений візуальний контроль за нанесенням завдяки жовтуватому кольору адгезиву перед світловою полімеризацією



Жовтуватий перед світловою полімеризацією для легшого нанесення



Абсолютно невидимий після світлової полімеризації для найкращого естетичного результату

Насолоджуйтеся спрощеною процедурою!

Працюйте без проблем!

Завдяки робочому часу (7 хвилин у дозувальній луночці) G-Premio BOND дозволяє працювати спокійно. Також він пропонує універсальне рішення в одній пляшці: для прямого бондингу, для починки та для лікування гіперчутливості. Нанесення стало дуже легким завдяки оптимальній в'язкості та змочуваності - ви можете сказати, що G-Premio BOND «поводить себе ніби вода».

Забудьте про громіздку рутинну роботу!

Забудьте про відходи!

Використовуючи G-Premio BOND, ви можете зберегти ваш дорогоцінний час завдяки дуже швидкій процедурі. 25 сек при самопротравлюванні, 50 сек при вибіркового чи тотальному протравлюванні. Це буде найбільшою перевагою в ситуаціях, де ізоляція не є ідеальною, або при роботі з дітьми. G-Premio BOND також допоможе вам мінімізувати небажані матеріальні витрати завдяки унікальній силіконовій кришці що оптимізує контроль над дозуванням, та тонкому носику, що видає дуже маленькі краплі – до 300 у кожній пляшці. Стабільний до останньої краплі...

Перестаньте марнувати час та матеріал!

