

## РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ ЦЕМЕНТ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

## РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

1. Фіксація вкладок, накладок коронок, мостовидних протезів на металевому каркасі та металевих штифтів.
2. Фіксація керамічних коронок та мостів на каркасі підвищеної міцності (оксид цирконію).

## ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. Пряме перекриття пульпи.
2. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів.  
У разі виникнення реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

## ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Співвідношення порошку до рідини (г / г)	1,8/1,0
Час змішування (сек.)	20"
Робочий час (хв., сек.) (при температурі 23°C) (від початку змішування)	2'00"
Час затвердіння (після встановлення конструкції на місце)	4'30"

## 1. ПІДГОТОВКА ЗУБУ

- а) Відпрепаруйте зуб, застосовуючи традиційну методику. Для перекриття пульпи використовуйте матеріали на основі гідроксиду кальцію.
- б) Очистіть відпрепаровані зуби з допомогою пемзи та води.
- в) Ретельно промийте зуб водою. Видаліть надлишки вологи, промокнувши ватним тампоном або просушивши повітрям без домішок масла під невеликим тиском.  
НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Поверхня зуба повина виглядати вологою (блищати).

## 2. ПІДГОТОВКА ОРТОПЕДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ

Переконайтесь в тому, що ортопедична конструкція була попередньо оброблена відповідно до інструкцій виробника.

## 3. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ ТА РІДИНИ

- а) Стандартне співвідношення порошок / рідина складає 1,8г/1,0г.  
(Одна ложка порошку та дві краплі рідини).
- б) Для точнішого дозування порошку злегка постукайте боковою стінкою пляшечки об долоню. Не струшуйте та не перевертайте пляшечку.
- в) Пляшечку з рідиною тримайте вертикально, надавлюйте несильно
- г) Закривайте пляшечки одразу ж після використання.

## 4. ЗАМІШУВАННЯ

Помістіть необхідну кількість порошку та рідини на блок для змішування. Додайте весь порошок в рідину та швидко змішуйте пластиковим шпателем протягом 20 секунд.

## Примітка:

При замішуванні великої кількості матеріалу розділіть порошок на дві рівні частини. Змішуйте першу порцію з усією рідиною протягом 5 секунд. Потім додайте порошок, що залишився, і ретельно змішуйте увесь матеріал протягом ще 15 секунд (загальний час – 20 секунд).

## 5. ТЕХНІКА ФІКСАЦІЇ

- а) Нанесіть шар цементу достатньої товщини на внутрішню поверхню реставрації та встановіть її на місце. Робочий час складає 2 хвилини від початку змішування (при температурі 23°C (73,4°F)). Більш висока температура призведе до скорочення робочого часу.
- б) Протягом усього часу твердіння сила надавлювання повинна бути помірною.
- в) Починайте видаляти надлишки цементу, коли матеріал за своєю консистенцією стане подібним до гуми.
- г) Фінальну обробку можна починати не раніше, ніж за 4 хв. 30 сек. після встановлення ортопедичної конструкції.

## ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодному та темному місці при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F).  
(Термін придатності: 3 роки від дати виробництва)

## КОЛІР

Світло-жовтий

## РОЗФАСОВКА

1. Упаковка типу 1-1: 35 г порошку, 25 г (20 мл) рідини, ложечка для порошку, блок для змішування (№ 20).
2. Пляшечка 35 г порошку з ложечкою.
3. Пляшечка 25 г (20 мл) рідини.

## УВАГА

1. У випадку контакту з м'якими тканинами порожнини роту або зі шкірою негайно видаліть матеріал серветкою або тампоном, змоченими в спирті. Промийте великою кількістю води. Задля запобігання потрапляння матеріалу на шкіру, або слизову використовуйте для ізоляції робочого поля коффердам та/або масло какао.
2. При потрапленні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.
3. НЕ ЗМІШУЙТЕ порошок або рідину з компонентами будь-яких інших склоіономерних цементів.
4. Цей продукт не використовується для реставрації порожнин та для побудови кукси.

Останні зміни внесено : 04/2008



MANUFACTURED  
by GC CORPORATION  
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585,  
Japan  
DISTRIBUTED by  
GC CORPORATION  
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan



GC EUROPE N.V.  
ResearchDPark, Interleuvenlaan 13, BD3001 Leuven,  
Belgium  
GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street, Alps, IL 60803 U.S.A.  
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.  
19 Loyang Way, #06D27 Singapore 508724