

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

## COE-PAK™

### ПЕРИОДОНТАЛЬНА ПОВ'ЯЗКА

БЕЗ ЕВГЕНОЛУ, БЕЗ АЗБЕСТУ. Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання. Для використання лише лікарями-стоматологами відповідно до рекомендованих показань.

### ПОКАЗАННЯ

Використовуйте COE-PAK там, де необхідна періодонтальна пов'язка.

- + Не містить евгенол ... не буде запалених чутливих тканин порожнини рота або розтрісканих пластмасових конструкцій.
- + Еластичний матеріал ... не зламається і не утворить гострі краї, які ушкоджують тканини.
- + Повна стабільність ... при нормальних умовах зберігання не стає непридатним.
- + Гладкий, адгезивний, легко набуває бажаної форми.
- + В порожнині рота залишається чистим ... немає неприємного смаку.

### ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Використовуйте блок для змішування COE і шпатель COE з нержавіючої сталі. Не використовуйте жорсткий або вузький шпатель. Дуже важливо ретельно змішувати матеріал. Найлегше це зробити, використовуючи широкий, гнучкий шпатель.
2. При використанні COE-PAK AUTOMIX встановіть картридж у диспенсер і приєднайте змішувальну насадку. Видавіть на блок для змішування смужку COE-PAK необхідної довжини. (Не використовуйте більше, ніж 4 повних порції матеріалу). Залиште змішувальну насадку на картриджі до наступного використання.
3. При використанні ручної версії видавіть з тубиків основи і каталізатора смужки рівної довжини. Замішуйте матеріал 30-45 секунд або до досягнення однорідного стану. Якщо потрібно отримати більш жорстку пов'язку, перед змішуванням додайте невелику кількість порошку оксиду цинку до рожевої пасту (каталізатору).
4. Використовуючи шпатель COE з нержавіючої сталі, надайте замішаній пасті циліндричну форму.
5. Злегка змастіть пальці вазеліном, ланоліном, кремом або змочіть водою і спробуйте замішану пасту на липкість (вона повинна втратити липкість протягом 2-3 хвилин; 1 хвилина в разі використання жорсткої версії швидкого твердіння). ПРИМІТКА: з COE-PAK AUTOMIX можна працювати через 30 секунд. Змащувати пальці немає необхідності.
6. З COE-PAK можна працювати і надавати йому форму через 2-3 хвилини після змішування. Кінчиками пальців скачайте циліндричну заготовку на блоці для змішування (1 хвилина в разі використання жорсткої версії швидкого твердіння).
7. Робочий час COE-PAK становить 10-15 хвилин (5-8 хвилин в разі використання жорсткої версії швидкого твердіння). Протягом цього часу матеріал можна використовувати звичайним чином: ліпити шнурочки або надавати іншу бажану форму.
8. Протягом робочого часу COE-PAK має високі когезійні властивості. З нього можна виліпити шнурки практично будь-якого діаметру для легкого нанесення на тканини порожнини рота і зуби.

## ПОРІВНЯННЯ COE-PAK / COE-PAK AUTOMIX

(Смужки рівної довжини – змішування 30 секунд)

	COE-PAK REGULAR	COE-PAK AUTOMIX
Готовність до використання після змішування	3 хвилини	30 секунд
Консистенція	пластична	пластична
Робочий час	10-15 хвилин	8 хвилин
Здатність шматків матеріалу склеюватися між собою	10-15 хвилин	8-12 хвилин
Остаточна твердість	30 хвилин (матеріал все ще еластичний, але не ламкий)	10 хвилин
Лінійна зміна розмірів через 24 год. (%)	87	80

### ПРИМІТКА:

Відомі випадки чутливості до деяких компонентів даного продукту. Зазначена чутливість коливається від простого почервоніння шкіри до висипання, набряку і нудоти і / або блювання. Перед використанням матеріалу лікар повинен переконатися у відсутності такої чутливості у конкретного пацієнта.

Термін придатності: 24 місяці від дати виробництва.

EEC Registered Manufacturer  
CE 0086  
GC EUROPE N.V.  
Interleuvenlaan 13  
B+3001 Leuven

DISTRIBUTED by GC EUROPE N.V.  
Interleuvenlaan 13  
B+3001 Leuven

MANUFACTURED by GC AMERICA INC.  
3737 West 127th Street  
Alsip, Illinois 60803 U.S.A.

GC AMERICA INC.  
ALSIP, IL 60803 U.S.A