

## Інструкція з використання

# ШУР-Корд Плюс

## SURE-Cord® plus

(Ukrainian Version)



### В'язана ретракційна нитка, просочена хлоридом алюмінію

Використовується для ретракції ясенних тканин навколо зуба перед зняттям відбитка зубів, для видалення залишків крові, слини та тканинних рідин у ясенній борозні.

### Склад

Фарбована в'язана нитка з поліетилентерефталату/поліаміду 6.

Просочення: Гексагідрат хлориду алюмінію.

### Характеристики

Вміст  $AlCl_3$ : Розміри: 000.0; 000; 00; 0:  $0.5 \pm 0,3$  мг/дюйм

Розміри: 1; 2:  $1.0 \pm 0,4$  мг/дюйм

### Спосіб використання

1. Перевірте стан ясенних тканин, зокрема їхню глибину та товщину, навколо зуба, який будете реставрувати.
2. Перед використанням перевірте термін придатності продукту (дивіться дані на упаковці).
3. Виберіть нитку необхідної товщини відповідно до параметрів зубоясенної борозни та відріжте нитку потрібної довжини.
4. Введіть та обережно запакуйте нитку в ясенну борозну, використовуючи інструмент для пакування ретракційної нитки або інший стоматологічний інструмент.
5. Видаліть ретракційну нитку безпосередньо перед зняттям відбитку.

### Вказівки щодо застосування

1. Призначення
  - В'язана ретракційна нитка, просочена хлоридом алюмінію, використовується для ретракції ясенних тканин навколо зуба перед зняттям відбитків зубів, для видалення залишків крові, слини та тканинних рідин у ясенній борозні.
2. Показання до застосування
  - Використовується для ретракції ясен з метою зняття стоматологічних відбитків, коли необхідно досягти гемостазу.
3. Протипоказання
  - Не застосовувати для пацієнтів з алергією на гексагідрат хлориду алюмінію.
  - Необхідно уникати глибокого пакування нитки при захворюваннях пародонту у пацієнта.
  - При використанні ретракційної нитки на запаленій ділянці слід зважувати переваги та ризики.
4. Використовується для пацієнтів усіх вікових груп.
5. Для використання лише лікарями-стоматологами.
6. Побічна дія/Негативні наслідки використання:
  - Повідомлення про побічну дію або негативні наслідки використання відсутні.
7. Потенційний ризик при повторному використанні:
  - Повторне використання відрізаної ретракційної нитки може спричинити запалення.
8. Може використовуватися разом з інструментом для пакування ретракційної нитки та кровоспинним засобом лише під контролем лікаря-стоматолога за клінічними показаннями.
9. Для одноразового використання.

### Застереження

1. Не використовуйте відрізану ретракційну нитку повторно.
2. Перед використанням перевіряйте цілісність упаковки.
3. Застосовуйте матеріал лише за призначенням.
4. Не використовуйте продукти, термін придатності яких закінчився.
5. Матеріал призначений для використання лише лікарями-стоматологами.

6. Якщо використання нитки продовжується більше 20 хвилин, існує ризик виникнення рецесії ясен; перед зняттям відбитку ретракційна нитка повинна бути видалена.
7. Необхідно уникати глибокого пакування нитки при наявності захворювань пародонту у пацієнта.
8. Контакт з лужними реагентами або фосфатами може стати причиною згортання крові.
9. Витягуйте нитку повільно для запобігання травмування тканин ясен.
10. При використанні ретракційної нитки на запаленій ділянці слід зважувати переваги та ризики.

#### Вміст упаковки

Диспенсер з ниткою довжиною 254 см (100 дюймів).

#### Умови зберігання

1. Закривайте пляшечку-контейнер кришечкою відразу після використання.
2. Зберігайте при кімнатній температурі у сухому приміщенні, уникаючи потрапляння прямих сонячних променів.

#### Утилізація

Слід утилізувати відповідно до чинних норм законодавства країни, в якій використовується продукт.

**Термін придатності:** 3 роки з дати виробництва.

#### Символи



- **Про будь-який серйозний інцидент, який стався у зв'язку з медичним виробом, необхідно повідомити виробника та компетентний орган держави, в якій перебуває користувач та/або пацієнт.**

Дата останнього перегляду інструкції: Редакція №6, 01.03.2022

 **SURE DENT CORPORATION**  
#809, 52 Sagimakgoko, Jungwon-gu, Seongnam-si,  
Gyeonggi-do, Korea  
Tel.: +82-31-737-4720 Fax: +82-31-737-4724  
<http://www.suredent.com>

**«ШУР ДЕНТ КОРПОРЕЙШН»**  
№ 809, 52, Сагімакгол-ро, Чунгвон-гу, Соннам-сі,  
Кьонгі-до, 13210, Республіка Корея  
Тел.: +82-31-737-4720 Факс: +82-31-737-4724  
<http://www.suredent.com>



Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «КРИСТАР-ЦЕНТР»  
вул. Межигірська, буд. 50, кв.2,  
м. Київ, 04071, Україна  
тел/факс: +380445020091,  
e-mail: info@kristar.ua, kristar.ua