

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

DENTIN CONDITIONER

РОЗЧИН ДЛЯ КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОРОЖНИН НА ОСНОВІ ПОЛІАКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ

DENTIN CONDITIONER – це слабкий розчин поліакрилової кислоти, призначений для зняття змазаного шару і кондиціонування дентину, що посилює адгезію між склоіономерним цементом та дентином.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. Після препарування зуба нанесіть на поверхні, що призначені для з'єднання, DENTIN CONDITIONER на 20 секунд за допомогою ватної кульки або аплікатора.
2. Ретельно промийте водою та підсушіть. НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Найкращі результати досягаються, коли відпрепарована поверхня виглядає вологою (блищить).
3. Нанесіть GC Fuji BOND LC, GC Fuji II LC або інший склоіономер в якості бондинг-агента, бази/підкладки або реставраційного матеріалу.
4. Закривайте пляшечку одразу після використання.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати у прохолодному та темному місці при температурі 4-25°C (39,2-77,0°F).
(Термін придатності: 2 роки від дати виробництва)

УПАКОВКА

Пляшечка 25 г (23,8 мл)

УВАГА

1. У випадку контакту з тканинами порожнини рота або зі шкірою негайно промийте водою.
2. При потраплянні в очі промийте великою кількістю води та зверніться до лікаря.

Останні зміни внесено: 11/2009

MANUFACTURED by GC CORPORATION
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan
DISTRIBUTED by GC CORPORATION
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan
GC EUROPE N.V.
ResearchDPark, Interleuvenlaan 13, BD3001 Leuven, Belgium
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alpis, IL 60803 U.S.A.
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06D27 Singapore 508724

CE 0086