

Перед застосуванням уважно прочитайте інструкцію з використання.

UK

Miracle Mix® CAPSULE

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ СКЛОІОНОМЕРНИЙ ЦЕМЕНТ З ВМІСТОМ СРІБЛА В КАПСУЛАХ

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

1. Надбудова кукси зуба.
2. Реставрація молочних зубів.
3. Випадки, коли необхідна рентгеноконтрастна реставрація.
4. Як матеріал для бази або прокладки.
5. Реставрація порожнин I класу, обмежене використання для реставрації порожнин II класу, тимчасові пломби і т. ін.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

1. Пряме перекриття пульпи.
2. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

1. ПРЕПАРУВАННЯ ПОРОЖНИНИ

- а) Відпрепаруйте зуб, використовуючи стандартну методику. Створення умов для макромеханічної ретенції не є необхідним. Для перекриття пульпи використовуйте матеріал на основі гідроксиду кальцію.
- б) Промийте й підсушіть, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ. Для видалення змазаного шару (Рис.1) рекомендуємо використовувати GC CAVITY CONDITIONER (10 секунд) або GC DENTIN CONDITIONER (20 секунд).

2. АКТИВАЦІЯ КАПСУЛИ / ЗАМІШУВАННЯ

- а) Перед активацією струсити капсулу або злегка постукати бічною стороною капсули об тверду поверхню, щоб розпушити порошок (Рис. 2).
- б) Для активації капсули вдав'яте плунжер так, щоб він повністю занурився у корпус капсули (Рис. 3).
- в) Одразу ж вставте капсулу в металевий пістолет GC Capsule Applier і один раз натисніть ручку (Рис. 4). Тепер капсула активована.





ПРИМІТКА:

Капсулу слід активувати безпосередньо перед замішуванням й одразу використати.

- г) Негайно вийміть замішану капсулу з пістолета й помістіть у міксер (або амальгамозмішувач) та замішуйте протягом 10 секунд на високій швидкості (+/-4000 циклів/хв.) (Рис. 5).

3. ТЕХНІКА РЕСТАВРАЦІЇ

- а) Швидко вийміть замішану капсулу з міксера й встановіть її у пістолет GC Capsule Applier. Час до початкового видавлювання після замішування: максимум 10 сек.

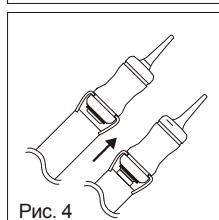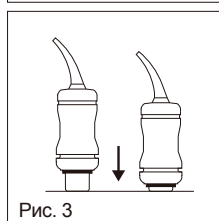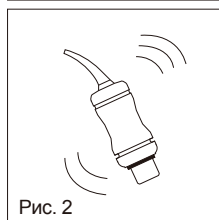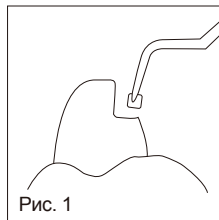

- б) Натисніть два рази, щоб заповнити носик капсули (Рис. 6). Робочий час складає 1 хв. від початку замішування при температурі 23°C. Більш висока температура призведе до скорочення робочого часу.
- в) Видаліть вологу з підготовленої поверхні, але НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
- г) Максимум протягом 10 секунд після замішування видавіть суміш безпосередньо у препаровану порожнину (Рис. 7). Уникайте утворення повітряних бульбашок.

ПРИМІТКА:

- 1) Для того, щоб встановити носик капсули в потрібному напрямку, тримайте пістолет у напрямку до себе та повертайте капсулу.
- 2) Щоб вийняти використану капсулу, натисніть на звільнюючу кнопку пістолета. Прокручуючи капсулу за та проти годинникової стрілки, витягніть її догори.

д) Сформуйте контур реставрації.

е) Час твердіння становить 5 хв. від початку змішування.

4. ФІНІШНА ОБРОБКА

Використовуйте стандартну методику (Рис. 8).

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати при температурі 4-25°C (39.2-77.0°F).
(Термін придатності: 2 роки від дати виробництва).

УПАКОВКА

Упаковка: 50 капсул.

Середній вміст капсули: 0,52 г склоіономерного цементу зі срібним сплавом та 0,11 г (0,09 мл) рідини.

Мінімальний об'єм замішаного цементу у капсулі: 0,09 мл.

Окремо: Пістолет GC Capsule Applier (1 од.).

УВАГА

1. У разі потрапляння матеріалу на тканини ротової порожнини або шкіру негайно видалити матеріал губкою або ватним тампоном, змоченими у спирті. Промити великою кількістю води.
2. У випадку потрапляння в очі негайно промити великою кількістю води та звернутися до лікаря.

Останні зміни внесено: 01/2009

GC

CE 0086

MANUFACTURED by GC CORPORATION
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan
DISTRIBUTED by GC CORPORATION
76D1HasunumaDcho, ItabashiDku, Tokyo 174D8585, Japan
GC EUROPE N.V.
ResearchDPark, Interleuvenlaan 13, BD3001 Leuven, Belgium
GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alpiss, IL 60803 U.S.A.
GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06D27 Singapore 508724

