

FujiCEM Evolve від GC

Крок вперед



Початкова ситуація



Дозування з автоматичною насадкою



Встановлення конструкції



Гумова консистенція досягається лише за 3 секунди преполімеризації



Легке видалення надлишків одним рухом



Кінцевий результат

З люб'язного дозволу професора R. Sorrentino, Італія



FujiCEM Evolve GC шприц (9.2 г / 5.0 мл)

012951	GC FujiCEM Evolve Starter Kit: шприц (1), насадки змішувальні (15) EEP
012952	GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: шприц (3), палетка для змішування (1) EEP
012953	GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: шприц (3), насадки змішувальні (45) EEP
012954	GC Push and Click насадки змішувальні (15)
012955	GC Push and Click ендо-насадки (15)



Дізнайтеся покрокову процедуру фіксації з **GC Luting Guide**

FujiCEM є торговою маркою GC.
Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM та Riva Cem не є торговими марками GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 11
Тел.: (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська, 50, оф. 1
Тел./Факс: (044) 503-11-11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

ZOLF UA02 110 - 06/19

Крок вперед

FujiCEM™ Evolve від GC

Інноваційний модифікований
смолами склоіономерний цемент
для перевіреного результату
та приємного процесу фіксації

FujiCEM Evolve від GC

Крок вперед

Склоіомери - це надбання GC, вони мають перевірену якість, що доведено незалежними дослідженнями по всьому світу. Зробіть крок вперед, обравши легке нанесення, менш чутливу техніку та високу стійкість до вологи з FujiCEM Evolve.



Ручне або автоматичне замішування



- Отвори знаходяться далеко один від одного: пасти не забруднюють одна одну, можливе ручне замішування

- Легко встановити насадку «Push & Click»
- Можна видавлювати безпосередньо в конструкцію або в кореневий канал (з ендонасадкою)



Модифікований смолами склоіомерний цемент, якому ви можете довіряти

- Менш чутлива техніка ніж у композитних цементів
- Немає потреби у попередній обробці; застосування за один етап
- Довгий робочий час, короткий час твердіння
- Стійкість до вологи: кофердам не потрібен
- Менший ризик постопераційної чутливості
- Відмінне крайове прилягання та адаптація



З люб'язного дозволу лікаря J. Tapia Guadix, Іспанія


Оптимальна в'язкість

- Контрольована екструзія для легкої процедури
- Тонка товщина плівки та точне припасування
- Можливість преполімеризації світлом для легшого видалення надлишків




З люб'язного дозволу лікаря J. Tapia Guadix, Іспанія

Надійна адгезія за будь-яких обставин

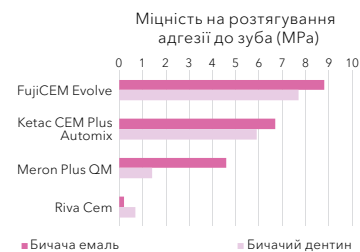

Джерело: GC R&D Data, Японія, 2018. Файл даних.

Оптимізована адгезія до діоксиду цирконію

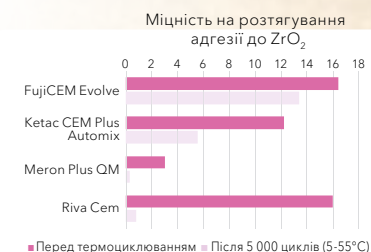

Джерело: GC R&D Data, Японія, 2018. Файл даних.

Технологія мономера з довгим ланцюжком

- Супердовгі ланцюжки мономера для міцності та стабільності цементу.



- Рентгеноконтрастний наповнювач для відмінної видимості на рентгені (> 250% Al)

Універсальний варіант для повсякденної практики

FujiCEM Evolve - це універсальний варіант для вашої повсякденної практики, адже його можна використовувати за багатьох показань та він не потребує повної ізоляції від вологи. Більш того, перевірена міцність адгезії до діоксиду цирконію робить його дуже корисним для фіксації високоміцних цільнокерамічних реставрацій.

Показаний для:

