

DIAPOLISHER PASTE

АЛМАЗНА ПОЛІРУВАЛЬНА ПАСТА
ДЛЯ КОМПОЗИТУ ТА КЕРАМІКИ

Перед застосуванням уважно
прочитайте інструкцію з
використання.

UA

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ

Полірування прямих композитних реставрацій, непрямих композитних і керамічних реставрацій для досягнення дзеркального блиску.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій припиніть використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ

I. Підготовка

- 1) Виконайте фінішну обробку та полірування, застосовуючи стандартну методику.
- 2) Тримаючи шприц ковпачком догори, зніміть ковпачок, повернувши його проти годинникової стрілки.
- 3) Правильно приєднайте дозуючу насадку, повернувши її за годинниковою стрілкою.

Примітка:

Не накручуйте насадку занадто міцно. Це може пошкодити різьбу. Для забезпечення надійної фіксації переконайтеся у відсутності будь-яких залишків матеріалу на різьбі.

- 4) Приєднавши дозуючу насадку, з метою попередження забруднення або висихання матеріалу встановіть на неї захисний ковпачок. Зніміть його безпосередньо перед використанням.

II. Дозування

Повільно натискаючи на плунжер, відмірте достатню кількість матеріалу в чисту палетку або на блок для змішування. Зберігайте шприц або з оригінальною кришкою, або з дозуючою насадкою, на яку встановлено захисний ковпачок.

III. Полірування

Нанесіть невелику кількість пасти на відповідну щітку або чашку для полірування композитів / кераміки. Поліруйте всі поверхні на невеликій швидкості (не більше 10 000 обертів на хвилину), застосовуючи помірний тиск. Дотримуйтеся інструкцій виробника полірувальної щітки чи чашки, що використовуються. Після полірування промийте водою, щоб видалити пасту.

Примітка:

При контакті з прилеглими тканинами зуба застосовуйте помірний тиск і працюйте на швидкості не більше 6 000 обертів на хвилину.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте при кімнатній температурі 4 - 26 °C подалі від впливу високих температур, вологи та прямих сонячних променів. Термін придатності: 3 роки з дати виробництва.

УПАКОВКА

Набір містить: пасту Diapolisher, 2 г (1 шт.), дозуючу насадку (голчатого типу) (1 шт.), захисний ковпачок (1 шт.).

Додатково: дозуюча насадка (голчатого типу) (20 шт.)

УВАГА

1. Для запобігання розбризкуванню пасти та / або надмірному тепловиділенню при обробці прямих / непрямих композитних і керамічних реставрацій використовуйте обертальні інструменти на швидкості, що не перевищує 10 000 обертів на хвилину; швидкість при обробці тканин зуба не має перевищувати 6 000 обертів на хвилину. Використовуйте захисні окуляри під час роботи.
2. При потраплянні в очі негайно промийте водою та зверніться до лікаря.
3. З метою запобігання виникненню можливої чутливості використовуйте в роботі пластикові або гумові рукавички.
4. При поліруванні полімеризованого матеріалу використовуйте пилозбірник та надягайте маску для запобігання вдиханню дрібних частинок матеріалу.
- б. Дозуюча насадка не підлягає стерилізації в автоклаві чи хіміклаві.

Останні зміни внесено: 05/2011

GC

MANUFACTURED by
GC CORPORATION
76-1Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

DISTRIBUTED by
GC CORPORATION
76-1Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8585, Japan

GC EUROPE N.V.
Research-Park, Interleuvenlaan 13, B-3001 Leuven, Belgium

GC AMERICA INC.
3737 West 127th Street, Alpis, IL 60803 U.S.A.

GC ASIA DENTAL PTE. LTD.
19 Loyang Way, #06-27 Singapore 508724

CE 0086