


# GC FUJIROCK EP PREMIUM

ПОКРАЩЕНИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ГПС ІV КЛАСУ

## ПОРОШОК 11 КГ


**GC**

GC EUROPE N.V.  
INTERLEUVENLAAN, 13  
LEUVEN, BELGIUM

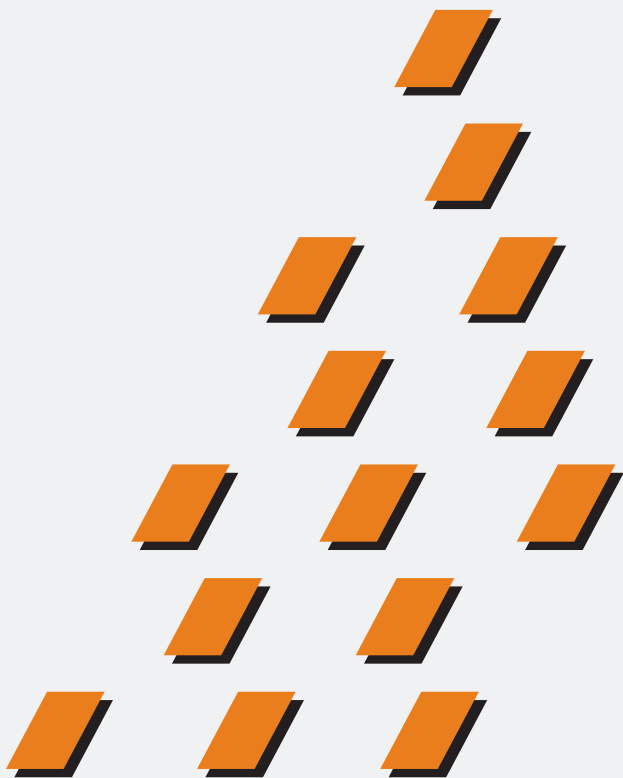


## Інструкція з використання


Співвідношення Порошок / Рідина

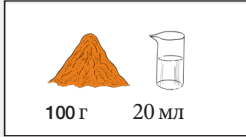


Час змішування

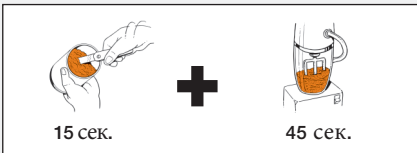

Використовуйте вібростолік під час заливки моделі

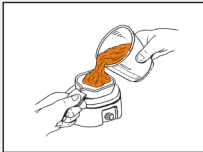

Час видалення з відбитку

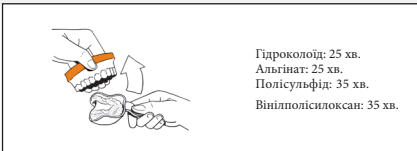

Примітки


1. Зберігати у прохолодному сухому місці в щільно закритому контейнері. Гіпси псуються під впливом повітря, особливо при підвищеній вологості.
2. Використовуйте дистильовану воду для отримання оптимальних фізичних властивостей.
3. Не вдихайте пил.
4. У разі контакту з очима, негайно промити водою.
5. Під час різання та обрізки використовуйте захисні окуляри.
6. Завжди використовуйте засоби індивідуального захисту, такі як захисні рукавички, маски та захисні засоби для очей.

# GC FUJIROCK EP CLASSIC

ISO 6873: Physical Data

Метод тестування: вологість 50%, 23°C (73.4° F) та дистильована вода

Час твердіння	9 - 12 хв.
Коефіцієнт розширення при твердінні (2 години)	0,09%
Міцність на стиснення (1 година)	≈ 60 МПа

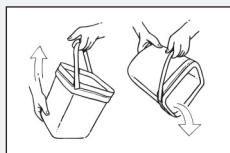

MANUFACTURED BY :

GC EUROPE N.V.

B-3001 Leuven

DISTRIBUTED BY :

GC EUROPE N.V.

B-3001 Leuven

GC AMERICA INC.

Alsip, IL 60803 USA

GC ASIA DENTAL PTE LTD.

Singapore 508724

T0400



PP

MADE IN E.U.